

HYDRAFACIAL ANTI-AGING M/RØDT LED-LYS BEHANDLINGSPROTOKOLL

HydraFacial Anti-Aging
m/Dermabuilder Boost
&
Rødt LED-lys



HydraFacial Anti-Aging m/Dermabuilder Boost & Rødt LED-lys

HUD-UTFORDRING – FINE LINJER, GUSTEN HUD, UJEVN HUDTEKSTUR OG LITEN GLØD

HYDRAFACIAL ANTI-AGING M/DERMABUILDER & RØDT LED -LYS – REDUSERER TEGN PÅ ALDRING OG GJENOPPBYGGER HUDEN MED EN KOMBINASJON AV PEPTIDER OG LED LYS + STARTSTEDET FOR REN, SUNN OG FRISK HUD MED NYGLØD!


HUDTYPE: ALLE

MÅLET MED HYDRAFACIAL ANTI-AGING M/DERMABUILDER & RØDT LED-LYS:

- RØDT LED LYS BOOSTER ANTI-AGING BEHANDLINGEN
- REDUSERE FINE LINJER
- FORBEDRE ELASTISITET
- FORBEDRE HUDTEKSTUR
- BEROLIGENDE
- EKSFOLIERING, DYPRENS, DETOX
- FJERNE, DØDE HUDCELLER – TREKKE UT HUDORMER
- TILFØRSEL AV FUKT OG ANTIOKSIDANTER
- SUNN OG FRISK HUD MED NY GLØD.

DERMABUILDER™

DermaBuilder booster is an advanced age refining peptide complex

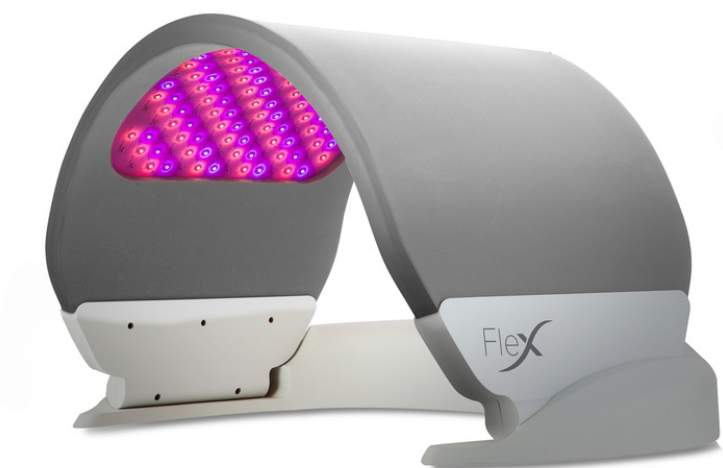

TRINN 1: EKSFOLIERING - VAKUUM 16-18


• Utføres 2 ganger på hvert område



Activ-4



Stor blå tip

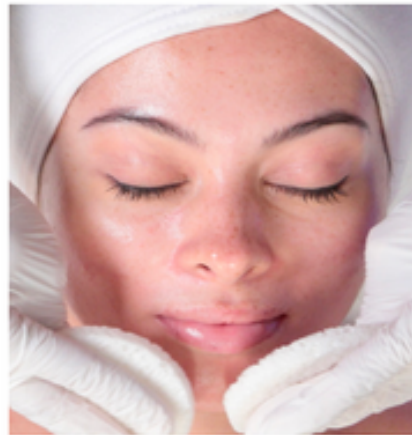

Rens



Tapping



Tapping



Tapping



Tapping



Tapping



Tapping



Korte Fjærlette strøk overlapp 40-60%



Korte Fjærlette strøk overlapp 40-60%



Korte Fjærlette strøk overlapp 40-60%



Tapping/hold



Korte Fjærlette strøk overlapp 40-60%



Korte Fjærlette strøk overlapp 40-60%



Korte Fjærlette strøk overlapp 40-60%



Korte Fjærlette strøk overlapp 40-60%



Korte Fjærlette strøk overlapp 40-60%



Korte Fjærlette strøk overlapp 40-60%



Korte Fjærlette strøk overlapp 40-60%

HydraFacial Anti-Aging
m/Dermabuilder Boost
&
Rødt LED-lys

TRINN 2: PEEL - VAKUUM 14-16



GlySal Peel/Peel MD



Liten lysegrønn tip

- GlySal skal ligge på 2-3 min. før Trinn 3
- Skal nøytraliseres med vann - tapping med pads - ikke dra av



Tapping - fordel med hand



Tapping - fordel med hand



Tapping - fordel med hand



Tapping - fordel med hand

GLYSAL™

BENEFITS

- Combines the benefits of aggressive exfoliation and chemical peels into a one-step resurfacing procedure.
- The result combines accelerated peel benefits with visible skin rejuvenation and no irritation.

INGREDIENT HIGHLIGHTS

- Glycolic Acid – Exfoliator
- Salicylic Acid – Exfoliator

GLYSAL™ PREP

7.5% Glycolic Acid
2% Salicylic Acid Peel
pH Level 3.0–3.5



GLYSAL™ PEEL

15% Glycolic Acid
1.5% Salicylic Acid Peel
pH Level 3.0–3.3



GLYSAL™ PEEL MD

30% Glycolic Acid
1.5% Salicylic Acid Peel
pH Level 3.0–3.3



(Physicians Only)

HydraFacial Anti-Aging
m/Dermabuilder Boost
&
Rødt LED-lys

TRINN 3: VAKUUM UTSUG - VAKUUM 20-30



Beta-HD Clear



Liten lysegrønn tip

- Utføres 2 ganger på hvert område



Sakte fjærlette strøk overlapp 40-60%



Sakte fjærlette strøk overlapp 40-60%



Tapping/hold



Sakte fjærlette strøk overlapp 40-60%



Sakte fjærlette strøk overlapp 40-60%



Sakte fjærlette strøk overlapp 40-60%



Sakte fjærlette strøk overlapp 40-60%



Sakte fjærlette strøk overlapp 40-60%



Sakte fjærlette strøk overlapp 40-60%



Sakte fjærlette strøk overlapp 40-60%

HydraFacial Anti-Aging
m/Dermabuilder Boost
&
Rødt LED-lys

TRINN 4: DERMABUILDER BOOST - VAKUUM 16-18



Dermabuilder



Stor klar tip

DERMABUILDER™

DermaBuilder booster is an advanced age refining peptide complex



Tapping hold
2 sekunder
La Dermabuilder
absorberes i huden



HydraFacial Anti-Aging
m/Dermabuilder Boost
&
Rødt LED-lys

TRINN 5: HELSE FOR HUDEN - VAKUUM 16-18



Antiox+



Stor klar tip



Tapping hold
2 sekunder



Tapping hold
2 sekunder




Tapping hold
2 sekunder



Tapping hold
2 sekunder




Tapping hold
2 sekunder

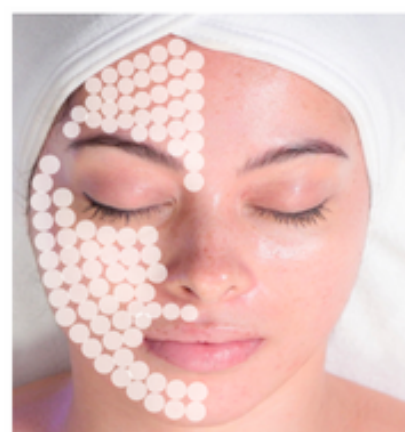

Tapping hold
2 sekunder




La Antiox+
absorberes i huden

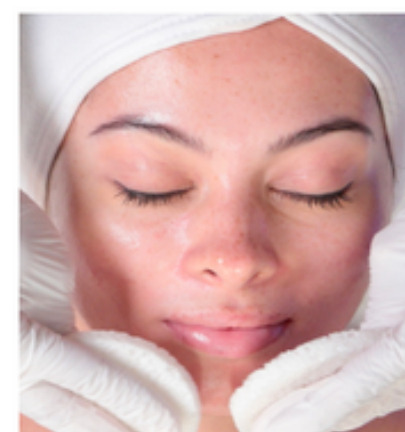

Avslutt med
ansiktsmassasje
med fuktighetskrem

HydraFacial Anti-Aging
m/Dermabuilder Boost
&
Rødt LED-lys

TRINN 6: DERMALUX FLEX RØDT- LYS 20MIN

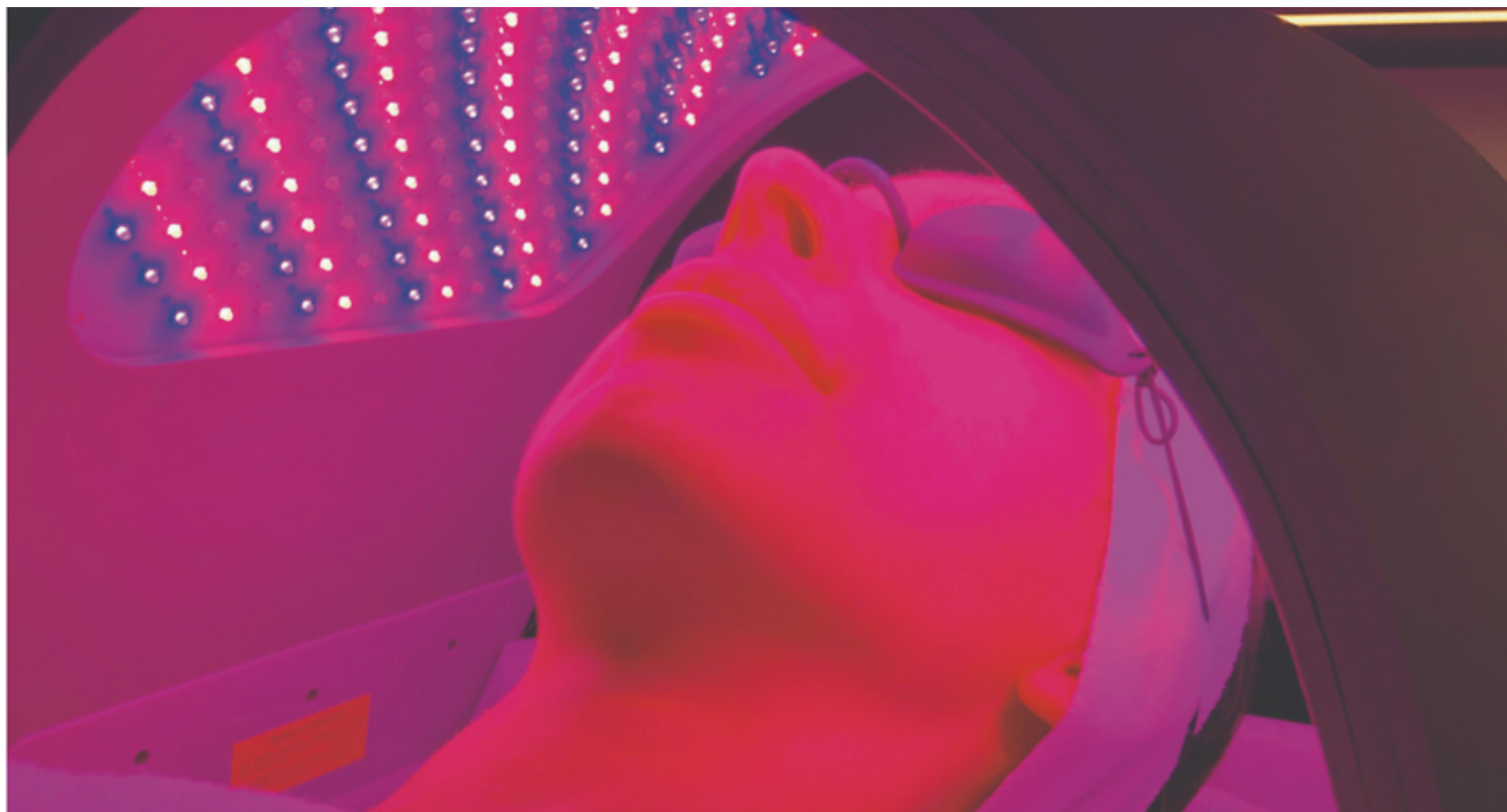

HydraFacial Anti-Aging
m/Dermabuilder Boost
&
Rødt LED-lys